



Használati utasítás

Végbéltampon az önkéntelen
székletürítés megakadályozására




Az egyes lépések:

- Mosson kezet, majd távolítsa el a fóliát.
- Tekerje le a kihúzószálat.
- **Áztassa be meleg vízben a RECAcare tampont, majd ezt követően nyomkodja ki.**
- Helyezze a tampont a bevezetőrúdra.
- Vegyen fel kényelmes pozíciót (hanyatt fekvő, vagy helyezze magasra az egyik lábát, pl. székre vagy a WC-re)
- Vezesse be a tampont a bélbe, majd húzza ki a bevezetőrudat (a záróizom megérintésekor bizonyos körülmények között összeszorító reflex alakul ki. Kérjük, várjon kb. 8-10 másodpercet, amíg a reflex elmúlik, majd ezután vezesse be a tampont).
- A WC-használat során bármikor eltávolíthatja a **RECAcare** a kihúzószállal, és a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatja.

Feel free!

Számunkra fontos, hogy Ön jól érezze magát:

- Ha szeretné, rögzítse bőrbarát ragtapasszal a szálát.
- Legkésőbb 20 óra elteltével távolítsa el a tampont.
- Vízeléskor nem kell eltávolítani a tampont.
- Úszáskor szintén nem kell eltávolítani a tampont.
- A használatot követően pH-semleges szappannal tisztítsa meg a bevezetőrudat, majd alaposan öblítse le vízzel

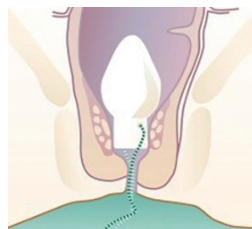

Méret és cikkszám:

Cikkszám	20.3	20.4			30.1
Ø / Hossz mm	25/52	35/63			25/115
Cikkszám	40.24	40.30	40.35	44.24	44.35
Ø / Hossz mm	23/48	28/50	33/55	23/48	33/56

Anyaga: PVA habanyag; szálak: 100% poliészter; csomagméretek: 10, 50 vagy 100 darabos; tesztkészlet: 7 vagy 15 különböző méretű és formájú tampon, 1 bevezetőrúd
Segédeszköz száma: 15.25.17.0003 + 0004

CE 0197

② Nem használható fel újból

📖 A használati utasításban foglaltakat figyelembe kell venni

Ellenjavallatok:

- nem tisztázott eredetű vérzések
- bélzáródás
- akut gyulladások a béltraktusban
- nem tisztázott hasúri fájdalmak vagy a bél perforációja

Mellékhatások:

A RECAcare tampon használata alkalmasszerűen nyomásérzéssel járhat. Ez az érzés normál esetben 3-4 nap elteltével, a tampon eltávolítását követően pedig biztosan megszűnik.

Figyelmeztetés:

Kérjük, tartsa be a használati utasításban foglaltakat. A RECAcare tamponok egyszer használatos termékek. A RECA Med nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használat esetén bekövetkező sérülésekért. A termék többszöri használata esetén lehetséges, hogy a higiénés feltételek már nem adottak.