

Használati utasítás

Hüvelytampon a nem szándékolt
vizeletvesztés megakadályozására



Kedves Vásárlónk!

Itt találja az Ön tesztkészletét. Néhány perc alatt szabadnak és biztonságban érezheti magát.

RECAfem hüvelytampon - gyorsan kipróbálható:

Először a kis tamponot próbálja ki. Amennyiben vizelet távozik, akkor ez a tampon túl kicsi. Kérjük, próbálja ki a következő méretet. Rövid idő elteltével megtalálja a megfelelő tamponot.

egyszerű - diszkrét - biztonságos

Az egyes lépések:

- Mosson kezet, majd távolítsa el a fóliát.
- Tekerje le a kihúzószálát.
- **Áztassa be röviden meleg vízben a RECAfem tamponot, majd ezt követően nyomkodja ki.**
- Vegyen fel kényelmes pozíciót (hanyatt fekvé, vagy helyezze magasra az egyik lábát, pl. székre vagy a WC-re)
- Vezesse be a tampont mélyen a hüvelybe. Kellemetlen érzés esetén, kérjük, ujjhegygel helyezze a tampont Önnek kellemes pozícióba.
- Ha szeretné, rögzítse bőrbarát ragtapasszal a kihúzószálát.
- A WC-használat során bármikor eltávolíthatja a **RECAfem** tampon a kihúzószállal, és a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatja.

Számunkra fontos, hogy Ön jól érezze magát:

- Legkésőbb 12 óra elteltével távolítsa el a tampont.
- Vízeléskor nem kell eltávolítani a tampont.
- Kérjük, menstruáció alatt ne használja a RECAfem tampont.
- Úszáskor szintén nem kell eltávolítani a tampont.



Méret és cikkszám:

Cikkszám	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5
Ø / Hossz mm	23/44	27/44	33/44	40/44	45/44
Cikkszám	66.1 V	66.2 V	66.3 V	66.4 V	66.5 V
Ø / Hossz mm	23/31	27/31	33/31	40/31	45/31
Anyaga: PVA habanyag; szálak: 100% poliészter Csomagméretek: 10, 30 vagy 60 darabos; segédeszköz száma: 15.25.21.2003					CE 0197

04/23-4.2.4-1/4-HU

Ⓜ Nem használható fel újból

📖 A használati utasításban foglaltakat figyelembe kell venni

Ellenjavallatok:

- nem tisztázott eredetű vérzések
- akut gyulladások a hüvelyi területen
- nem tisztázott húsrí fájdalom

Mellékhatások:

A RECAfem tampon használata alkalmasszerűen nyomásérzéssel járhat. Ez az érzés normál esetben 3-4 nap elteltével, a tampon eltávolítását követően pedig biztosan megszűnik.

Figyelmeztetés:

A RECAfem használata során hirtelen fellépő láz, hasmenés, hányás és émelygés vagy bőrkíütés esetén, kérjük, azonnal távolítsa el a tampont, és forduljon orvoshoz. Kérjük, tartsa be a használati utasításban foglaltakat. A RECAfem tamponok egyszer használatos termékek.

A RECA Med nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használat esetén bekövetkező sérülésekért. A termék többszöri használata esetén lehetséges, hogy a higiénés feltételek már nem adottak.