

efemia

bladder support



Invent Medic Sweden AB
Nytänkargatan 4, SE 223 63 Lund
Sweden

care@efemia.se
www.inventmedic.com



0123

HASZNÁLAT

Az Efemia Bladder Support egy olyan orvosi eszköz, amely átmenetileg csökkenti a stressz okozta vizeletszivárgást 18 éves és idősebb nőknél azáltal, hogy a húgycső középső szakaszát a hüvely falán keresztül támogatja.

STRESSZ INCONTINENCIA

A stressz vizelet-inkontinenciát (SUI) erőfeszítés vagy megerőltetés, illetve tüszögés vagy köhögés során bekövetkező önkéntelen vizeletszivárgás, a szivárgás mennyiségétől vagy gyakoriságától függetlenül. Sokan az inkontinenciát szociális és higiéniai problémaként élik meg. Az SUI irritációt, ekcémát és fertőzéseket is okozhat a nemiszervi területeken, amelyet a vizelet ismételt szivárgása okoz.


HASZNÁLATI JAVASLAT/ESZKÖZ LEÍRÁSA

- Az Efemia Bladder Support egy többször használható hüvelyen belül használatos támogató eszköz, amely orvosi minőségű szilikonból készül. A stressz inkontinencia okozta akaratlan vizeletszivárgás átmeneti enyhítésére szolgál.
- Használható olyan esetekben, amikor SUI bekövetkezésére számít, vagy 24 órás periódusonként akár 16 órán keresztül is viselheti.
- A készülék 3 méretben kapható a legnagyobb kényelem és hatékonyság elérése érdekében. Előfordulhat, hogy egynél több méretet kell kipróbálnia, hogy megtalálja, melyik a legkényelmesebb, és melyik a csökkenti leghatékonyabban az inkontinenciát. Eltarthat néhány próbálkozásig, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbbet.
- Bár nem kötelező, de ha kívánja, eltávolíthatja a készüléket a hólyag vagy a belek ürítése előtt.

Egyes nőknél előfordulhat bizonyos fokú kismedencei prolapsus, ami megnehezítheti az eszköz felhelyezését.

Előfordulhat, hogy az eszköz sűrűdést okoz a szeméremajkakon vagy a nyálkahártyán, és ez irritációhoz vagy kizsáradáshoz vezethet. Ez azért fordulhat elő, mert a szeméremtest és/vagy a hüvely környéke száraz vagy rendkívül érzékeny. Ha már tudja, hogy különösen érzékeny ezeken a területeken, vagy bármilyen irritációt vagy dörzsölést tapasztal, próbáljon meg valamilyen vízbázisú sikosítót használni a készülékkel.

1.

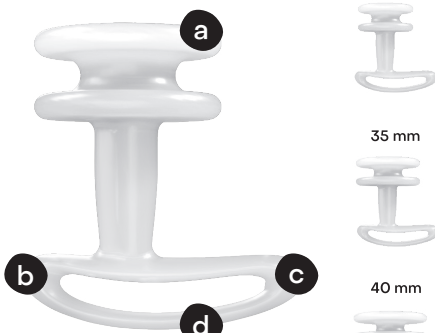


30 mm

35 mm

40 mm

2.

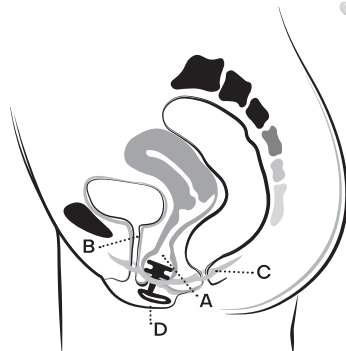2024-05
LA0104-01

L1: care@efemia.se
L2: www.hma.eu/human-medicines/national-contacts.html



NE HASZNÁLJON EFEMIA BLADDER SUPPORT

ha Ön terhes

⚠ ÖVINTÉZKEDÉSEK

- Amennyiben szeméremtesti ill hüvelyi szövetei érzékenyebbek, úgy a használatból eredő kellemetlenségek érdekében használjon vízbázisú sikosítót.
- Az eszköz használatához kapcsolódó, nem múló fizikai reakció esetén csökkentse a készülék használatát. Forduljon orvoshoz, ha a reakció a csökkentett használat ellenére sem múlik el.

Ha bármilyen problémát tapasztal a készülékkel vagy annak használatával kapcsolatban, kérjük, jelezze felénk! Minden, az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményt jelentésköteles. Kérjük ezeket jelentse felénk (L1), és az illetékes hatóság felé (L2).

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készüléket nem újrahasznosítható hulladékként dobja el, a helyi előírásoknak megfelelően.

AZ EFEMIA-RÓL

Az Efemia a nők egészségét és kényelmét szolgáló márká az Invent Medic Sweden-től. Tudjon meg többet rólunk és termékeinkről: www.efemia.se

MŰKÖDÉSI ELV

1. HASZNÁLAT ELŐTT

a. Törekedjen arra, hogy húgyhólyagja teljesen üres legyen. Mosson alaposan kezét vízzel és szappannal vízzel és szappannal.

b. Vegye ki a készüléket a csomagolásból, és öblítse le csapvízzel. Ez csökkenti a sűrűdést és megkönnyíti a hüvelybe történő behelyezést.

c. Keressen egy kényelmes testhelyzetet, álló helyzetben segíthet, ha térdést enyhén behajlítja.

2. ESZKÖZ BEHELYEZÉSE

a. Tartsa a készüléket úgy, hogy a fogantyú hátulja (lásd az 1c képet) lefelé, hátrafelé mutasson. Helyezze be a készüléket a hüvelyébe enyhén felfelé dőlve, hasonlóan ahhoz, mint ahogy egy tampont kell.

b. Nyomja a hüvelybe, amíg a fogantyú szorosan a testéhez nem támaszkodik, így a szeméremajkak elfedik a fogantyút. Győződjön meg arról, hogy a tartógyűrű teljesen ájtúnak a hüvelynyíláson és a medencefenék felett (lásd a 2C képet).



Gyártó



Lejárat dátum



Referenciaszám



Figyelmeztetés



Egyedi azonosító szám



Olvassa el a használati utasítást



Orvosi eszköz



Tételszám



Újrafeldolgozás



Információ

3. ELTÁVOLÍTÁS

a. Eltávolítást végezze üres húgyhólyaggal, amennyiben ez lehetséges.

b. Fogja meg a fogantyú külső részét, és óvatosan, de határozottan húzza meg, amíg a készülék ki nem jön.

c. Ha ellenállást vagy vákuumot érez, helyezze az ujját a tartógyűrű mellé, és óvatosan mozgassa oldalra.

4. TISZTÍTÁS

Tisztításhoz az alábbi módszerek egyikét ajánljuk:

i. Alaposan öblítse le csapvízzel. Ez ideális megoldás, ha azonnal újra kell használnia az eszközt.

ii. Csapvízben forraljuk 10 percig, majd hagyjuk levegőn megszáradni.

iii. Tisztítsa meg csapvízzel és szappannal, lehetőleg intim használatra szánt szappannal. Ügyeljen arra, hogy az egész készüléket megtisztítsa. Alaposan öblítse le, és hagyja megszáradni.

5. KÉSZÜLÉK CSERÉJE

3 havonta cserélje le az eszközt.

1. kép: a. Tartógyűrű b. Elülső c. Hátsó d. Fogantyú

2. kép: A. Vagina B. Húgycső C. Medencefenék D. Efemia Bladder Support